



Contour[®] plus ONE[»]

System na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

Ako stiahnuť
a inštalovať aplikáciu
CONTOUR™ DIABETES.




Contour®
plus ONE»
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

1.

Stiahnutie aplikácie

Ak používate iPhone alebo iPad,
otvorte aplikáciu App Store.

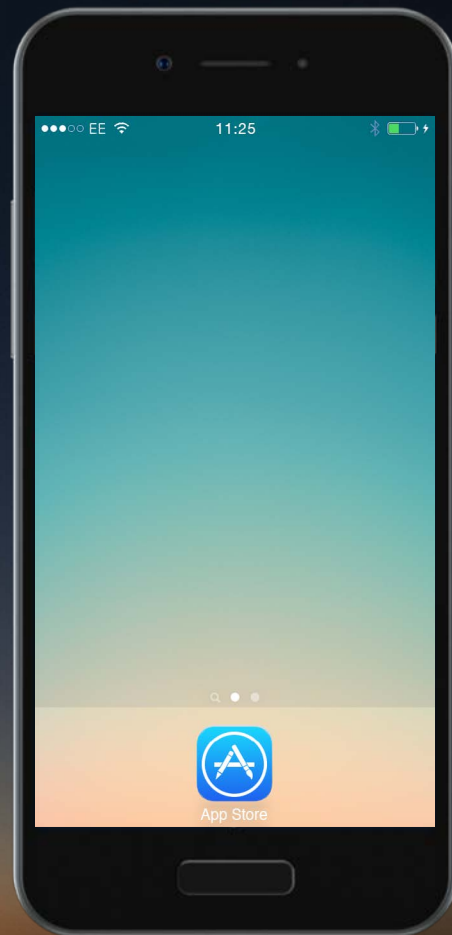


Contour[®]
plus ONE[»]
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

1.

Stiahnutie aplikácie

Ak používate iPhone alebo iPad,
otvorte aplikáciu App Store.

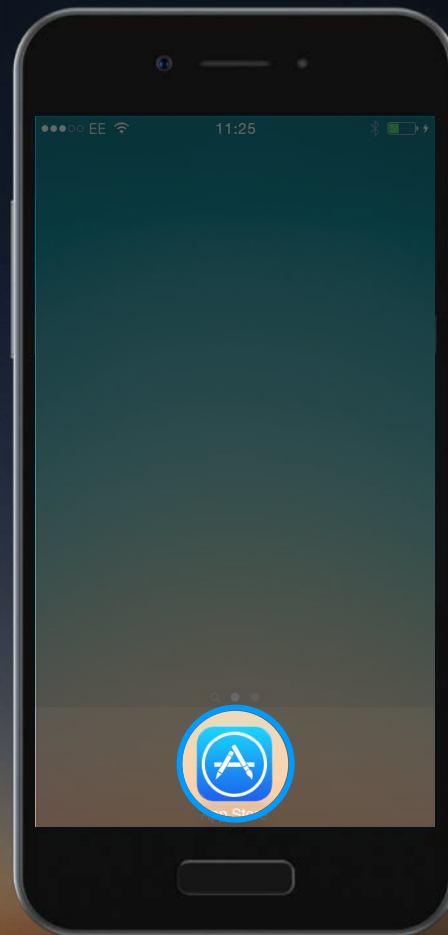


Contour[®]
plus **ONE**»
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

2.

Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu
COUNTOUR DIABETES.

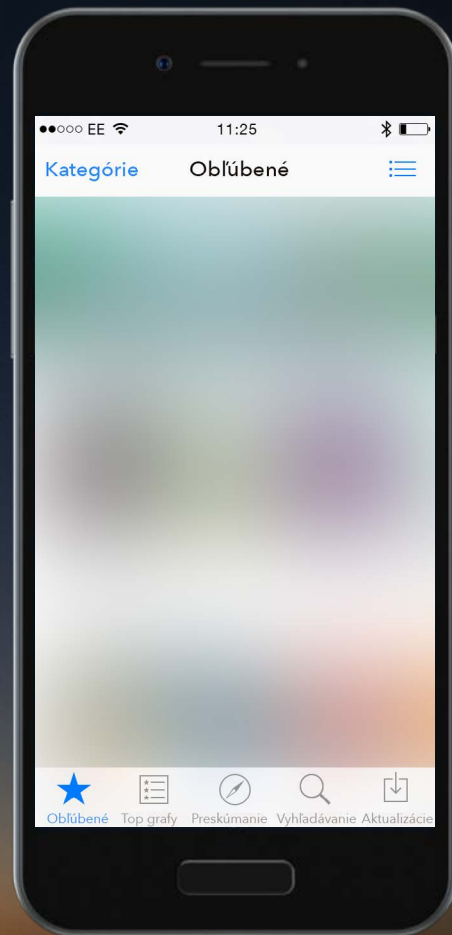


Contour[®]
plus **ONE**»
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

2.

Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu
COUTOUR DIABETES.

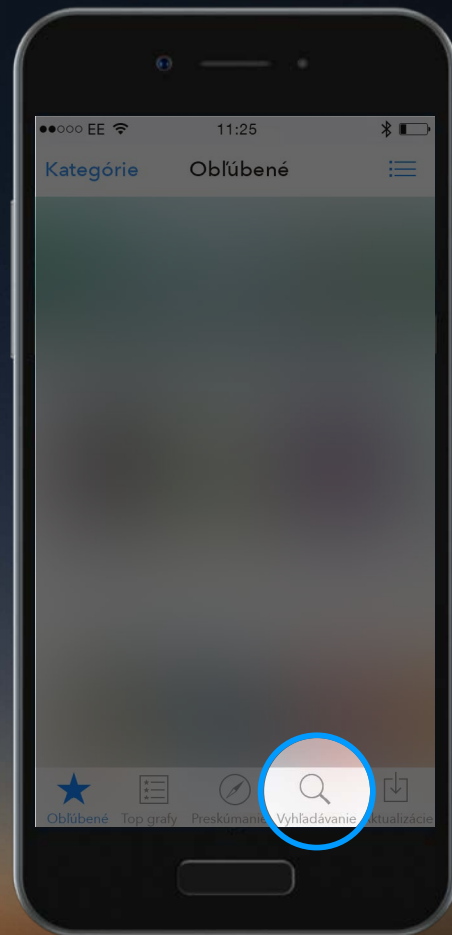


Contour[®]
plus **ONE**
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

2.

Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu
COUNTOUR DIABETES.

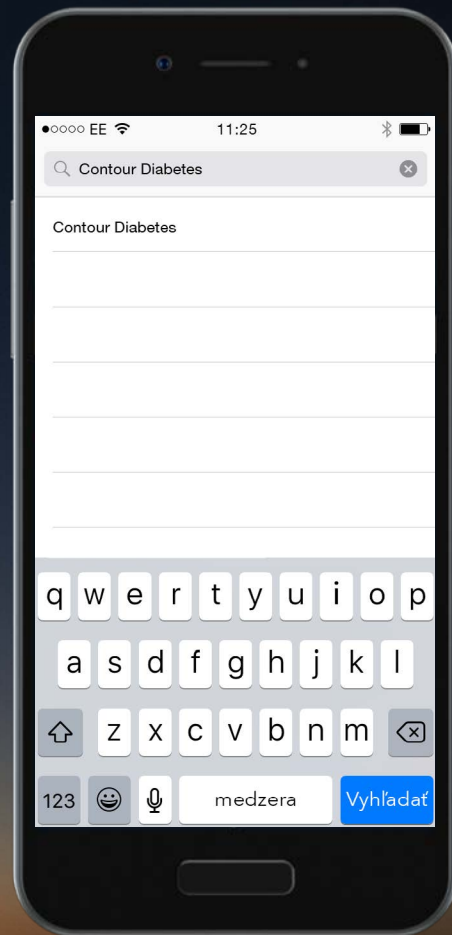


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

2.

Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu
COUNTOUR DIABETES.

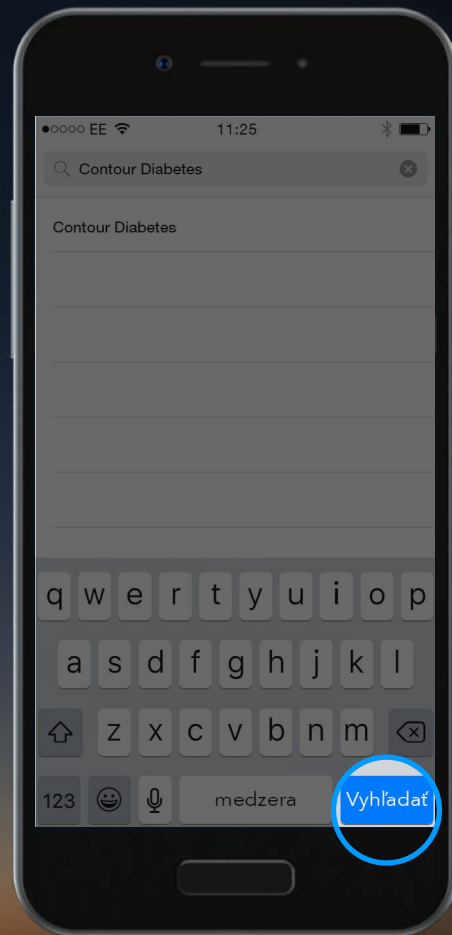

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi


diabetes.ascensia.com

3.

Stiahnutie aplikácie

Zvoľte 'Stiahnuť' a potom 'Inštalovať'
na začatie inštalácie aplikácie
CONTOUR DIABETES.

Po výzve zadajte heslo.

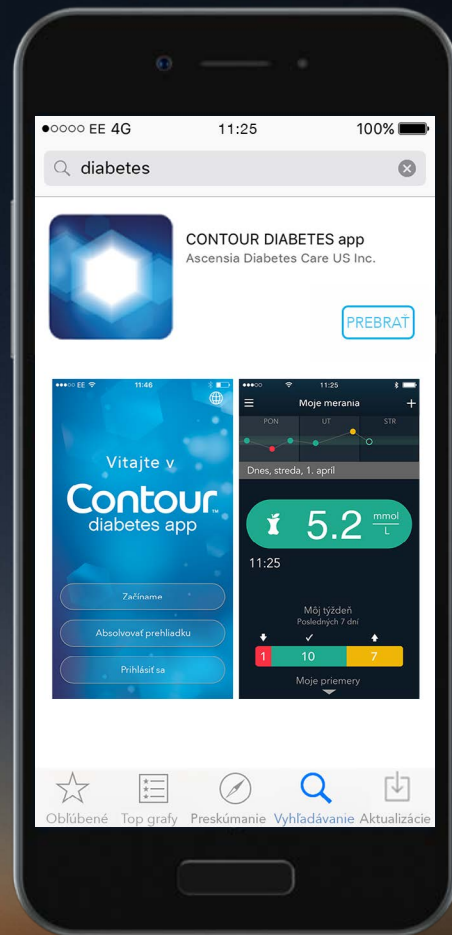

Contour[®]
plus ONE[®]

Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi


diabetes.ascensia.com

3.

Stiahnutie aplikácie

Zvoľte 'Stiahnuť' a potom 'Inštalovať'
na začatie inštalácie aplikácie
CONTOUR DIABETES.

Po výzve zadajte heslo.

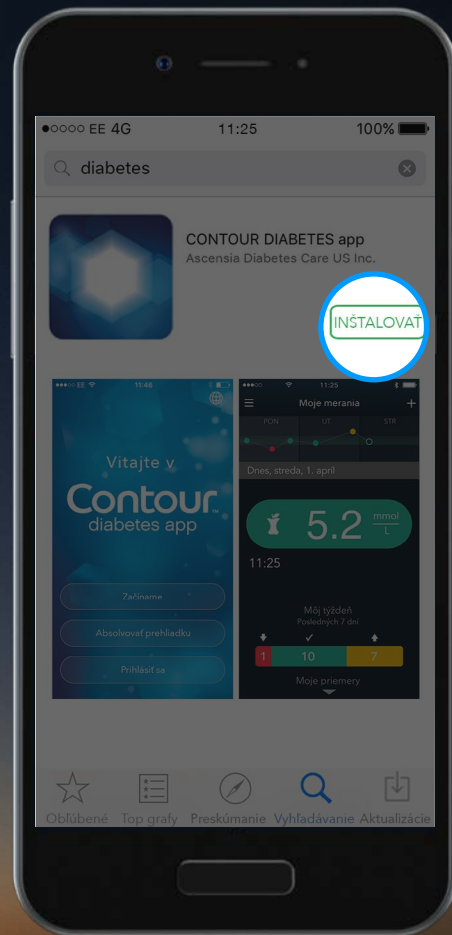


Contour[®]
plus **ONE**[®]

Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

4.

Inštalovanie aplikácie

Aplikácia **CONTOUR DIABETES**
sa začne inštalovať

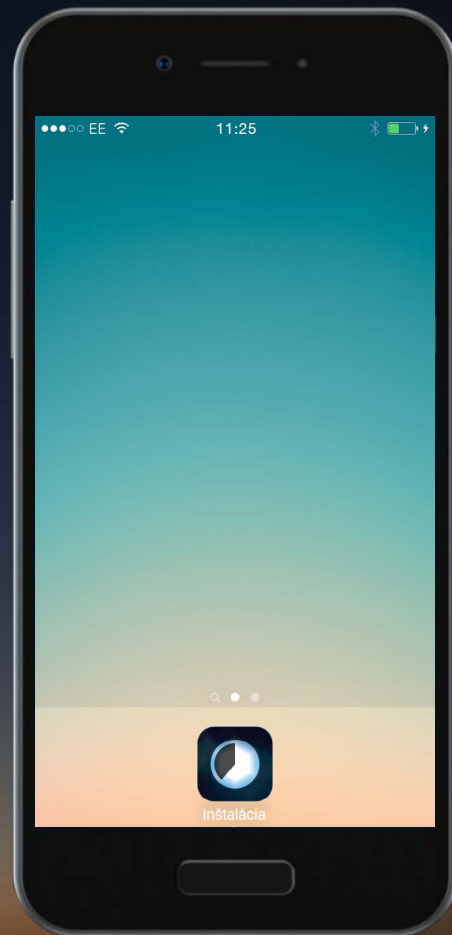


Contour[®]
plus **ONE**»
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

5.

Inštalovanie aplikácie

Aplikácia **CONTOUR DIABETES**
je nainštalovaná

Teraz môžete aplikáciu
CONTOUR DIABETES nastaviť

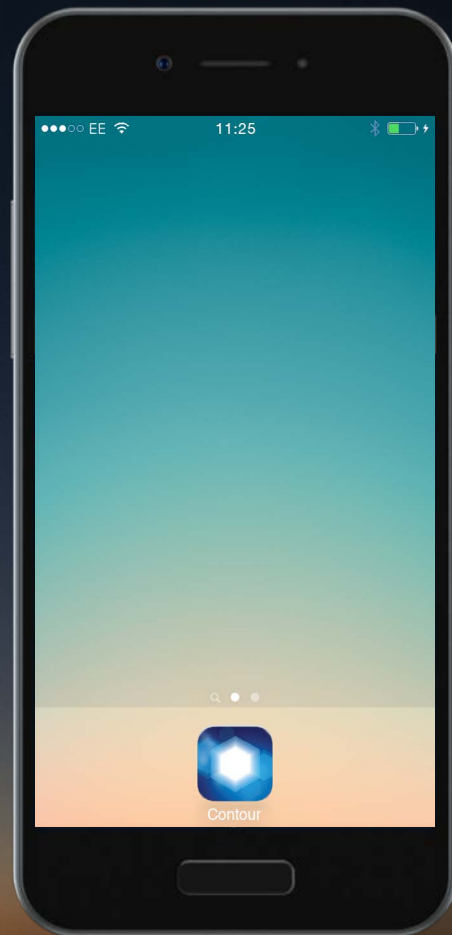


Contour[®]
plus **ONE**»
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

5.

Inštalovanie aplikácie

Aplikácia **CONTOUR DIABETES**
je nainštalovaná

Teraz môžete aplikáciu
CONTOUR DIABETES nastaviť

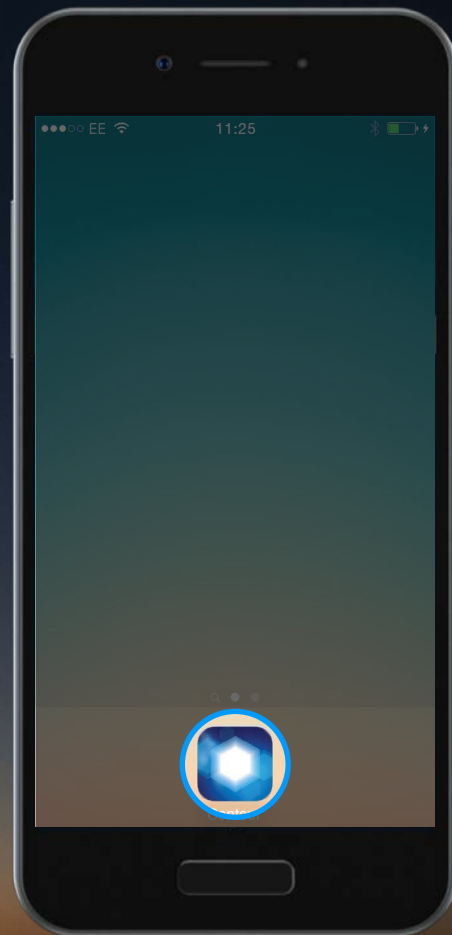


Contour[®]
plus **ONE**»
Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

Ak máte otázky ohľadom používania glukomeru **CONTOUR® PLUS ONE** a aplikácie **CONTOUR™ DIABETES**, obráťte sa, prosím, na lekára, prípadne nahliadnite do užívateľskej príručky.

Ďalšie informácie o glukomere, ako aj údaje o jeho dostupnosti vo Vašej krajine, sú uvedené na stránke diabetes.ascensia.com



Získajte aplikáciu

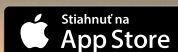

Apple a Apple logo sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanej v USA a iných krajinách. App Store je registračnou obchodnou známkou Apple Inc., Google Play je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a CONTOUR sú ochrannými známkami skupiny Ascensia Diabetes Care Holding AG.



**Contour®
plus ONE™**

Systém na monitorovanie
hladiny glukózy v krvi

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions