

Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

Vytváranie **plánov**
pripomienok meraní
s **CONTOUR®DIABETES**
aplikáciou




Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte
vždy vopred s Vaším lekárom.



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

Plán pripomienok meraní
Vám pomáha optimalizovať
monitoring merania tak,
že Vám poskytuje najúčelnejší
prehľad o hodnotách Vašej
hladiny glukózy v krvi.

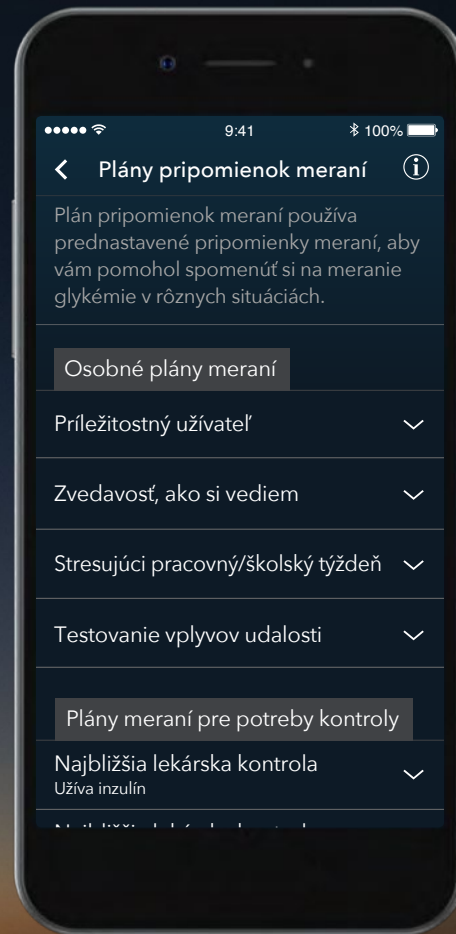


Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

1. Plán pripomienok merania

Plán pripomienok merania môžete zvoliť vybratím


Moje pripomienky z **Hlavnej Ponuky** a ťuknutím na **+**.

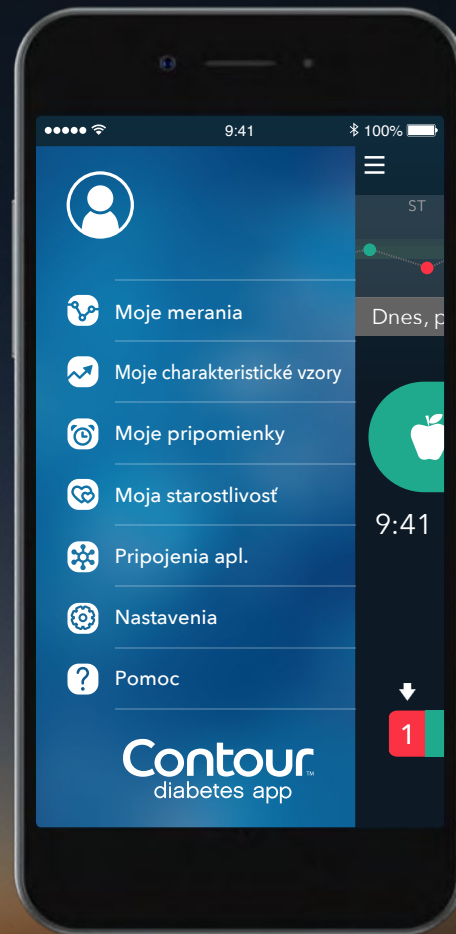

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

1. Plán pripomienok merania


Plán pripomienok merania môžete zvoliť vybrať **Moje pripomienky** z **Hlavnej Ponuky** a ťuknutím na **+**.

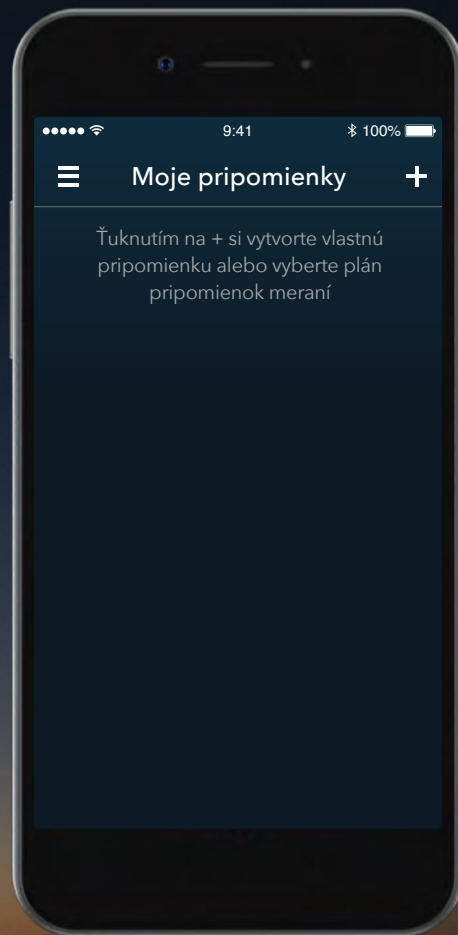

Contour[®]
plus **ONE**»
Blood Glucose
Monitoring System

1. Plán pripomienok merania


Zvoľte **Plán pripomienok merania**, aby ste vytvorili **Plán pripomienok merania**.

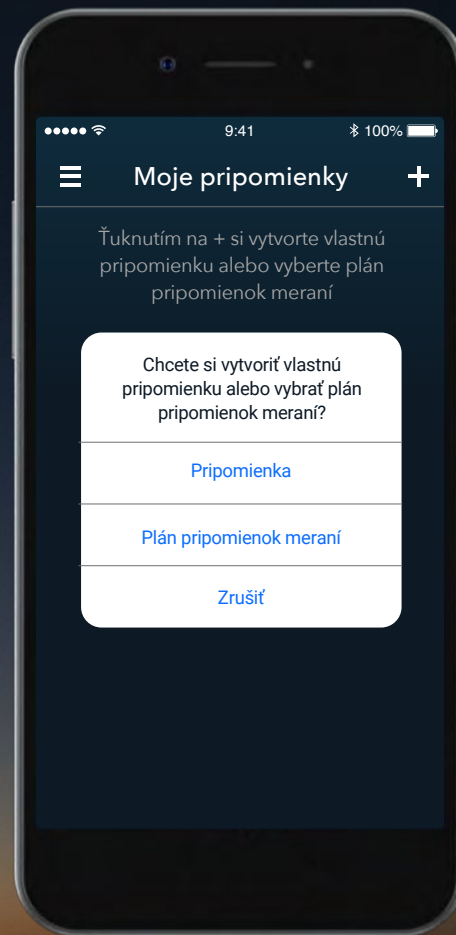

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

2. Plán pripomienok merania

Zvoľte **Plán pripomienok merania** ak s ním chcete pracovať.

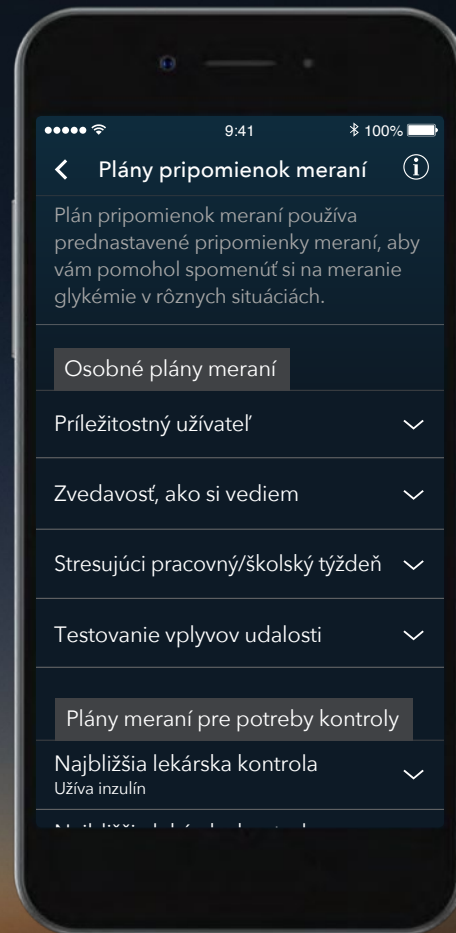


Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

2. Plán pripomienok merania

Zvoľte **Plán pripomienok merania** ak s ním chcete pracovať.

Ťuknutím na šípku vedľa každého plánu sa o ňom dozviete viac.

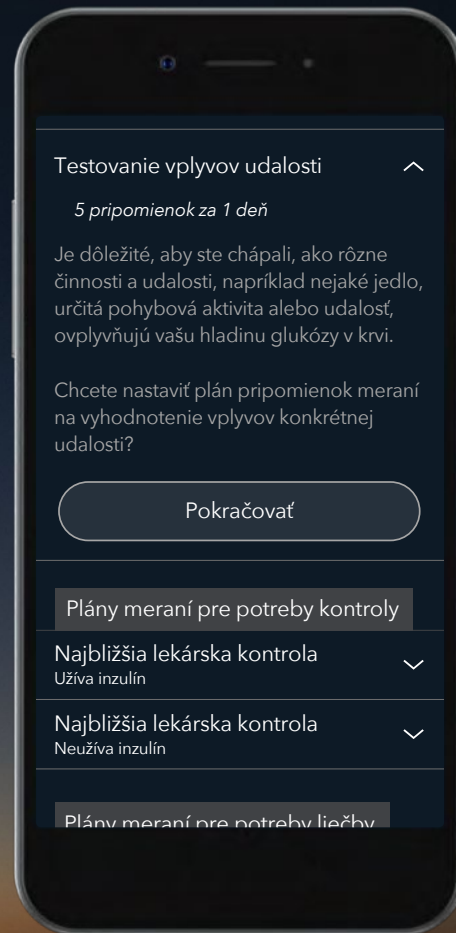


Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

2. Plán pripomienok merania

Zvoľte **Plán pripomienok merania** ak s ním chcete pracovať.

Ťuknutím na šípku vedľa každého plánu sa o ňom dozviete viac.


Vyberte **Pokračovať** aby ste upravili Vami vybraný **Plán pripomienok merania**.

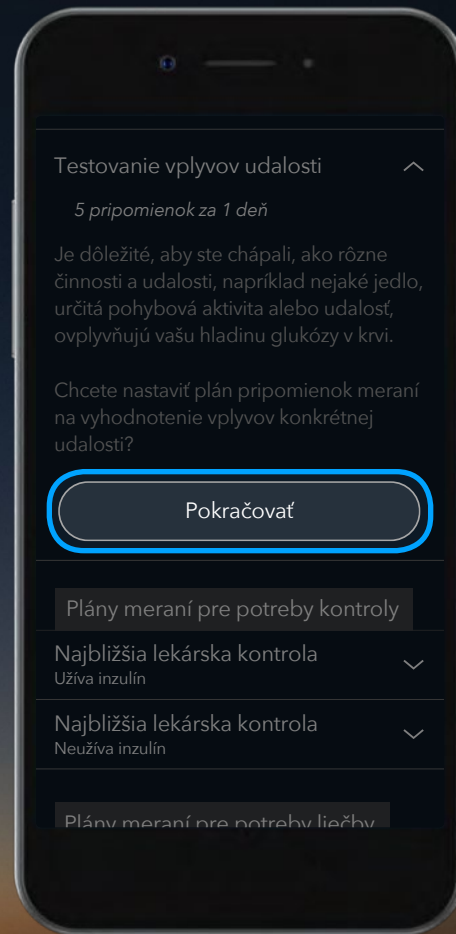

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. Plán pripomienok merania


Ťuknutím na tlačítko dátum a čas nastavíte dátum a čas udalosti, ktorú chcete sledovať.

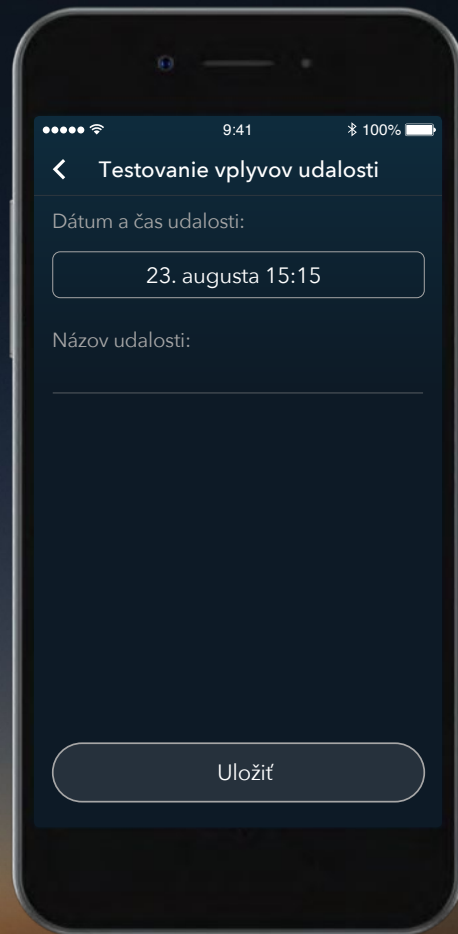

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. Plán pripomienok merania


Ťuknutím na tlačítko dátum a čas nastavíte dátum a čas udalosti, ktorú chcete sledovať.

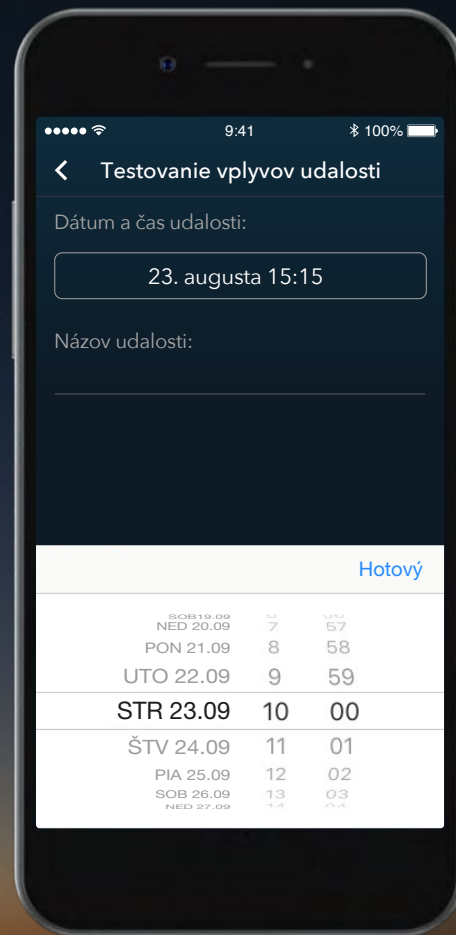

Contour[®]
plus **ONE**»
Blood Glucose
Monitoring System

3. Plán pripomienok merania


Ťuknutím na Názov udalosti otvorte klávesnicu a nazvite Vašu udalosť.

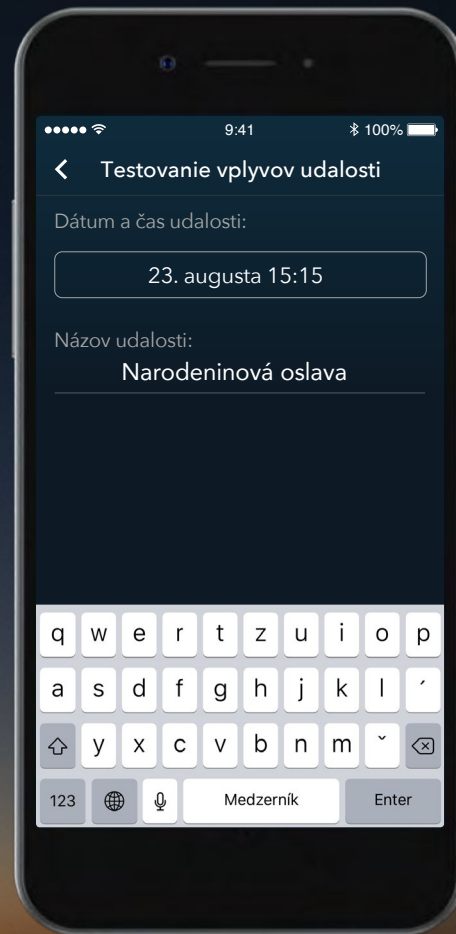

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

3. Plán pripomienok merania

Ťuknite na **Uložiť**.

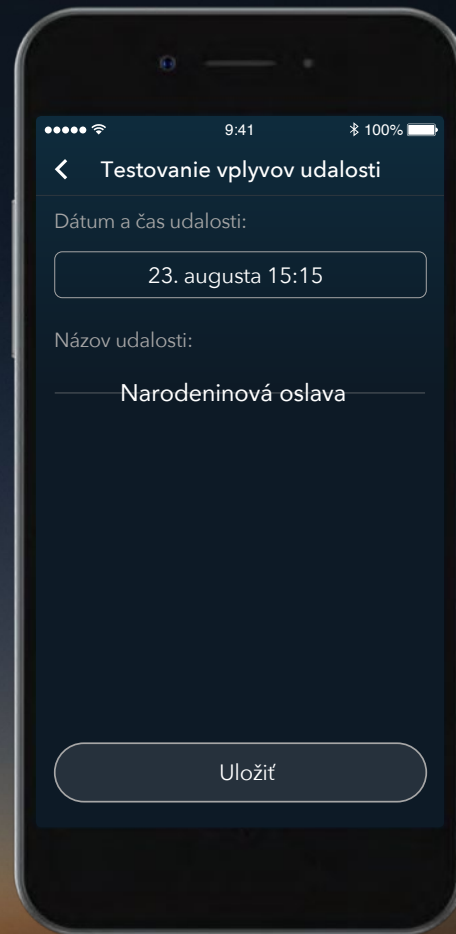


Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. Plán pripomienok merania

Ťuknite na **Uložiť**.

Váš **Plán pripomienok merania** je teraz aktívny.

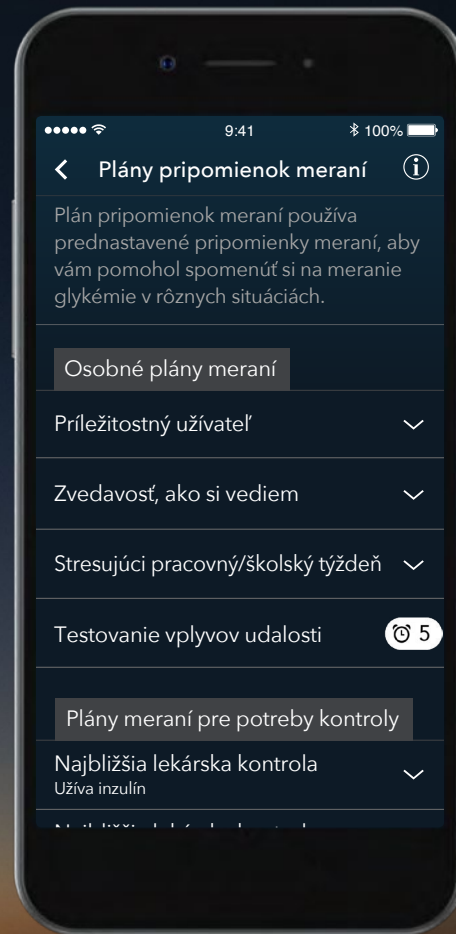

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

Ak máte akékoľvek otázky o inteligentnom glukomere **CONTOUR®PLUS ONE** alebo aplikácii **CONTOUR® DIABETES APP** obráťte sa na Vášho lekára alebo sa riadte pokynmi v používateľskej príručke.

Viac informácií a tiež informáciu, či sú tieto produkty dostupné vo Vašej krajine, nájdete na **diabetes.ascensia.com**.



Hypothetical patient data for demonstration purposes only.
Always consult with your healthcare provider prior to making changes to treatment, diet or exercise.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under licence. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52580



**Contour®
plus ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

Contour[®]
diabetes solutions